



Quick-Guide GUBBINI inkl. USB-kamera m. integreret lys

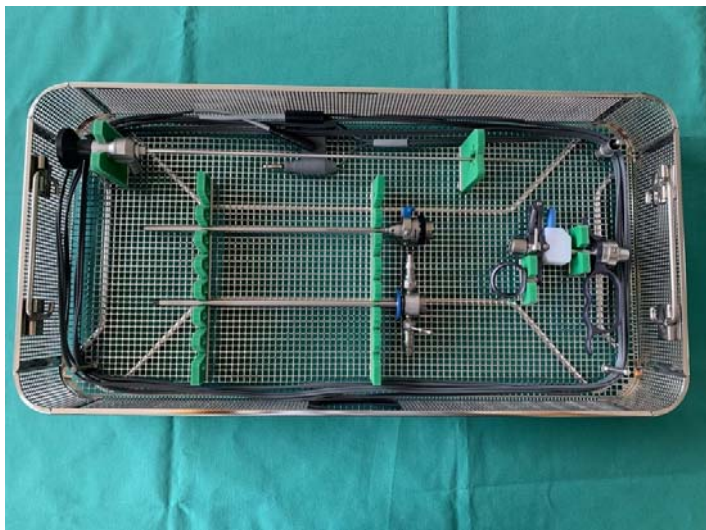


1. Ydre rør
2. Indre rør
3. Slynge/ball
4. Optik 0° inkl. adapter
 - 4 a. Adapter
5. Arbejdselement
6. USB-kamera og lyskabel
 - 6 a. Lyskilde
 - 6 b. Kameralinse
 - 6 c. Kamera
 - 6 d. USB-stik
7. Bipolært kabel



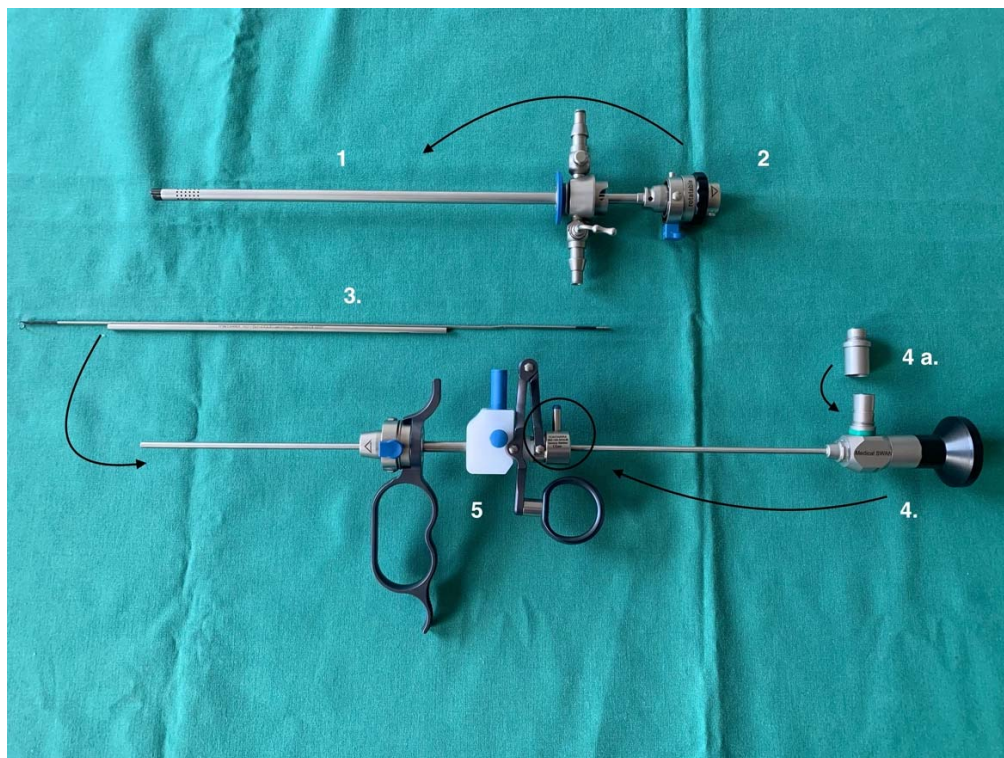

8. Sørg for at adapter (4.a) sidder på optikken (4)
9. Ydre rør (1) og indre rør (2) samles
10. Indfør optikken (4) i arbejds-elementet (5) og lås optikken fast med det lille håndtag på arbejds-elementet (5)
11. Sæt derefter slyngen (3) på optikken (4)
12. Slyngen (3) skal ramme det øverste hul i arbejds-elementet (5) over optikken (4), hvorefter du vil høre et klik

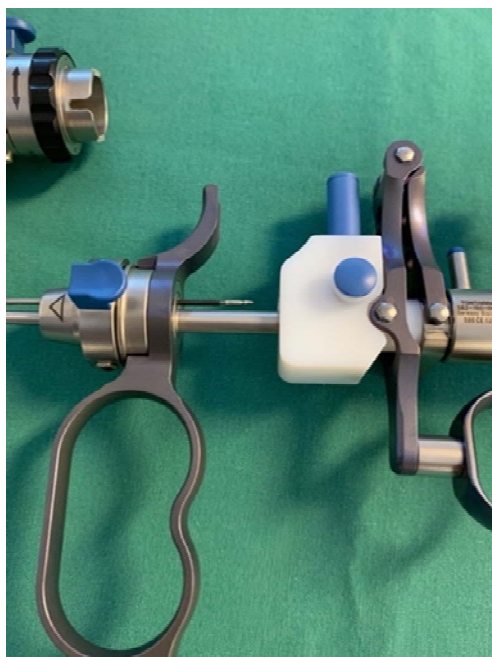



13. Det samlede ydre og indre rør, sættes sammen med arbejds-elementet (med optik og slynge)




14. Tilslut lyskabel og kamera



15. Tilslut det bipolære kabel (7) til GUBBINI's arbejdselement (5) og til jeres el-kirurgiske enhed (indstilles på saltvandsprogram)
16. Tilslut USB stikket i computeren. Tryk på kameraikonet
17. Hvidbalancere kameraet
18. In/out flow slanger tilsluttes

GUBBINI er nu klar til brug

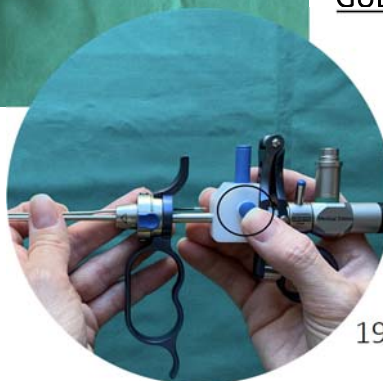

19. Efter brug fjernes engangs eller flergangsslyngen ved at trykke på den blå knap