


Quick Guide  
Gynko, sterilt engangs hysteroskopi Sheaths

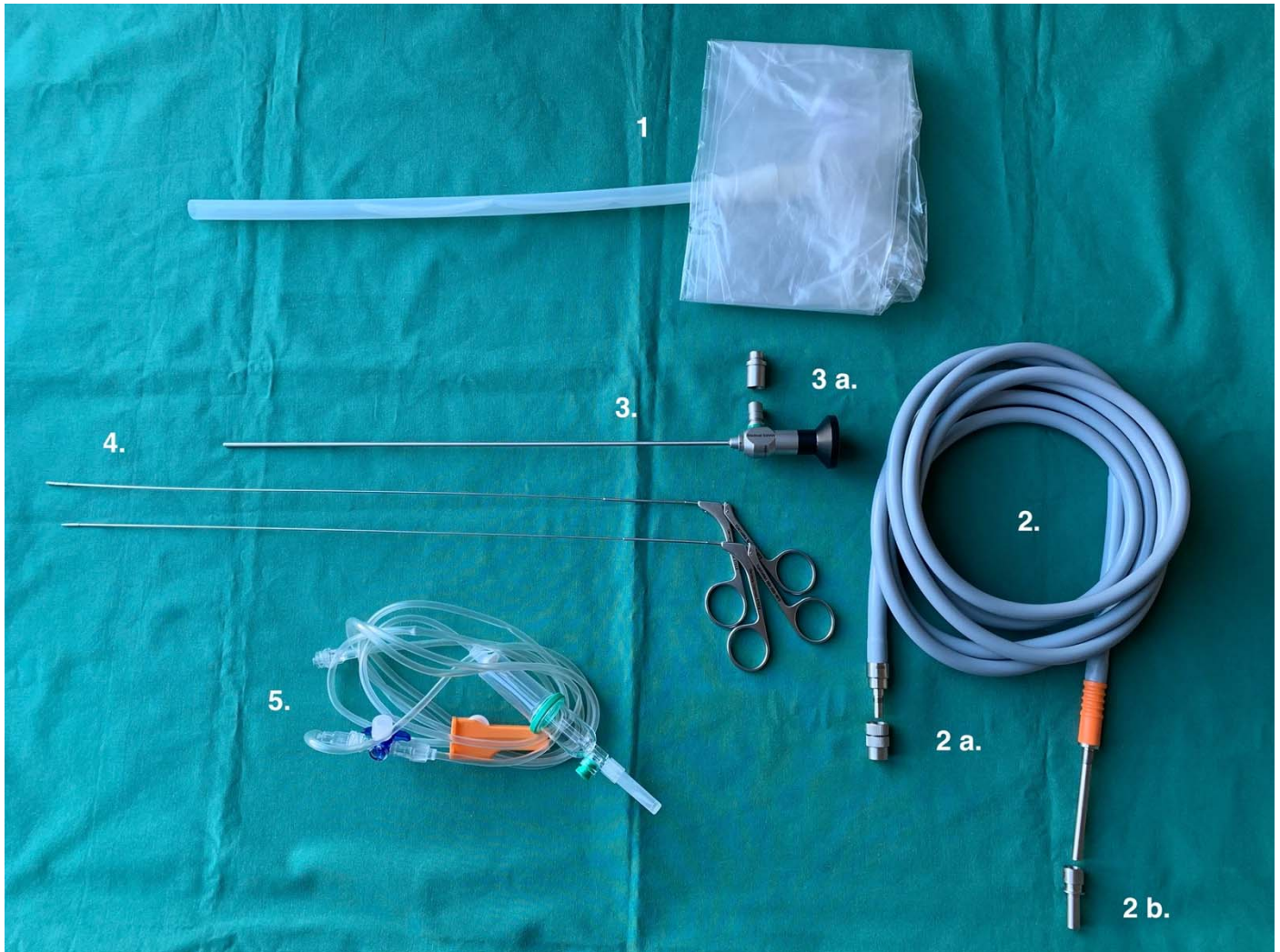


1. Gynko Sheat
2. Lyskabel
  - 2 a. adapter
  - 2 b. adapter
3. Optik
  - 3 a. adapter
4. Grasper og saks
5. Inflowslange

**Tilgangsmåde:**


6. Sæt adapter 2 a. og 2 b. på lyskablet
7. Sæt adapter 3 a. på optikken
8. Tilslut lyskablet

**OBS** vend den rillede side af adapteren ind mod lyskablet



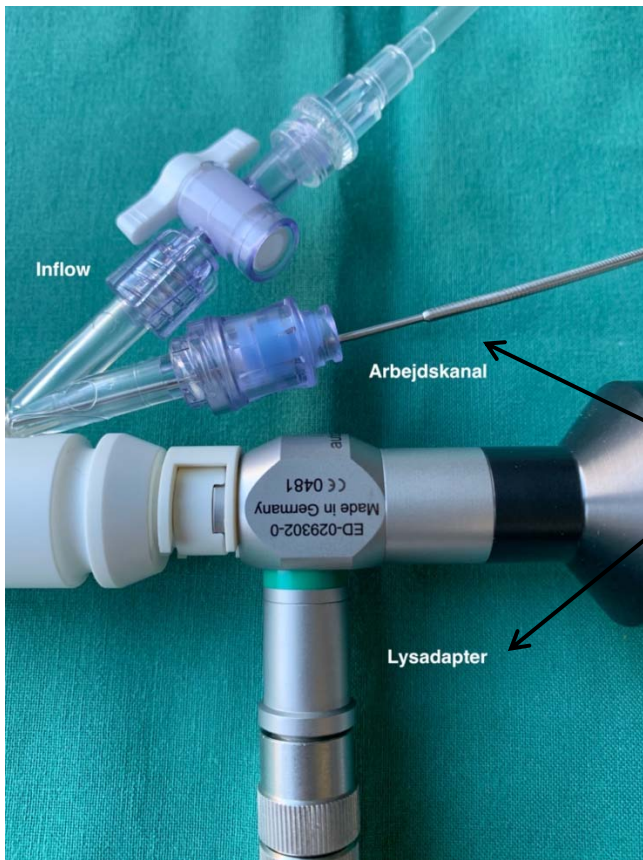


1. Indfør optikken således at lysadapteren og lyskabel vender modsat af arbejdskanal/inflow

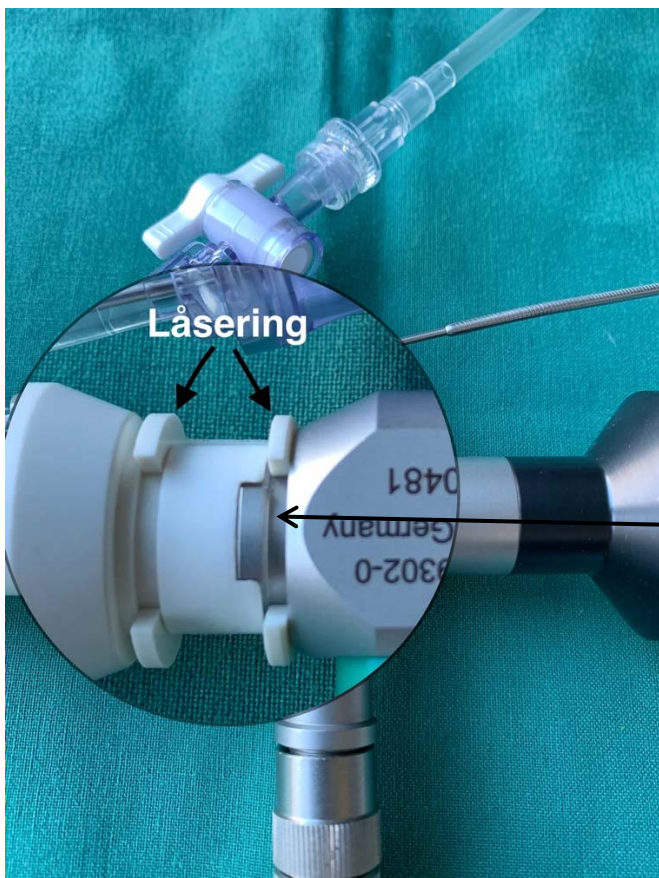

2. Sørg for at låseringen er åben og kanten af optikken går i hak med låseringen



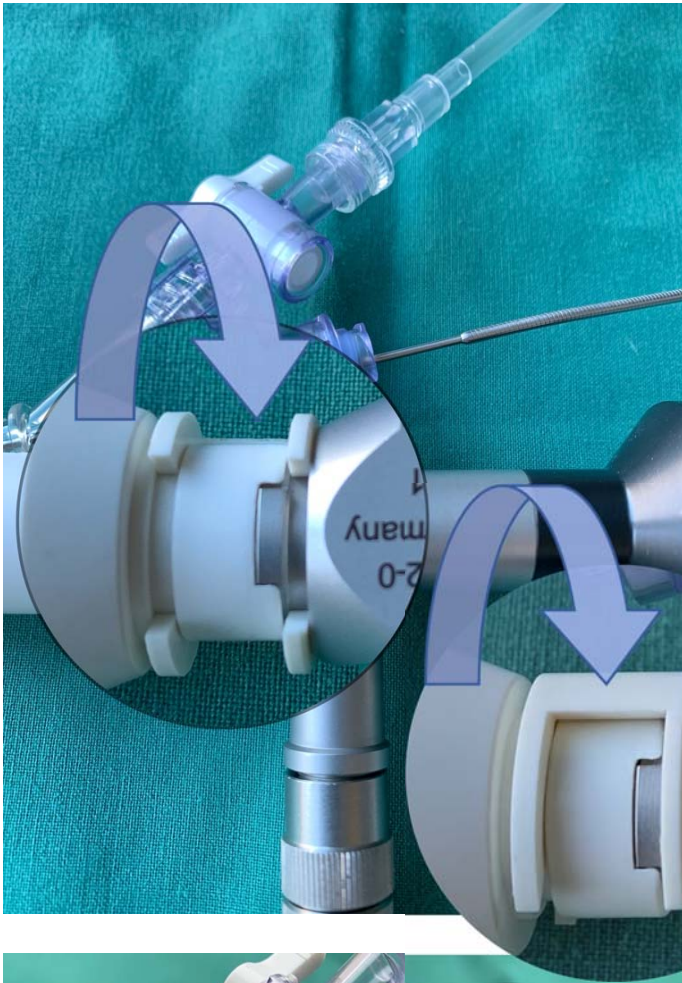

3. Pres optikken forsigtigt ind i Gynko sheathet, til den går i hak med låseringen
4. Drej låseringen 45° for at låse optikken til Gynko Sheathet



5. Brug langefingeren til at dreje låseringen på plads, mens du forsigtigt holder optikken på plads i hakket



**Tip:** Sæt en pegefinger på graspen/saksen når den indføres for bedre kontrol