


Brugervejledning til Labview

1. Fastgør Labview med luer-lock til trocar-porten - generelt er porten placeret, hvor kirurgen indsætter diatermi instrumentet.
2. Fastgør klemmen på den sterile afdækning.
3. Åben port-ventilen.
4. Lad rulleklemmen være lukket, indtil diatermi på begyndes.
5. Åbn rulleklemme, når Diathermy er påbegyndt - denne kan være åben, indtil proceduren er afsluttet.

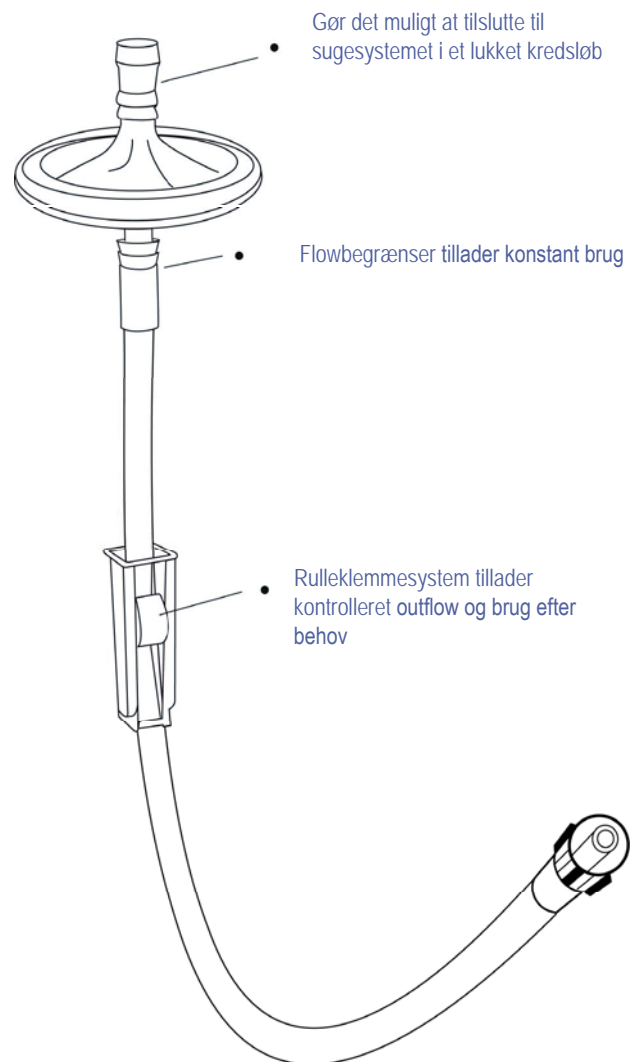

Varenr.: FA LESS 7008