

BLODTRYKSMANCHET

Brugsanvisning:

1. Vælg den korrekte manchetstørrelse i henhold til omkredsen på patientens arm eller ben.
2. Se nedenstående figur for påsætning af manchetten med siden "This side to patient" mod patientens arm eller lår og symbolet " ↓ " eller " φ " på manchetten over den brachiale eller femorale arterie. Manchetten placeres rundt om armen eller låret.



3. Forbind manchetten til blodtryks apparatet via en blodtryksslange.

Rengøring og desinficering:

1. Manchetten kan rengøres med en fugtig klud og mildt sæbevand.
2. Manchetten kan desinficeres med en klud med spritholdig væske samt med ultraviolet lys.

Udskiftning af manchet:

Manchetten skal udskiftes, hvis den bliver beskadiget. Hvis monitoren indikerer en utæthed, skal slange og manchet kontrolleres.

Krav til opbevaring:

Temperatur: -5°C-40°C Fugtighed: 0%-85% Atmosfærisk tryk: 86Kpa-100Kpa

Transport:

Kan anvendes under transport. Skal beskyttes mod stød samt regn og sne under transporten. Må ikke sendes sammen med giftige, skadelige og ætsende produkter.

Bemærk:

Ved forkert placering kan målingen blive unøjagtig.

Advarsler:

Anbring ikke manchetten på den arm, der benyttes til intravenøst drop eller måling af iltmætningen (SpO2).

Kontraindikationer: ingen

Om symbolerne på manchetten:



Dette symbol angiver armen eller benets omkreds.

Manchetterne indeholder ikke latex.

Manchetterne overholder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.