

Zero 60 A - 10ml beholder med 8% neutral formalin + 10 ml saltvand med fosfat

① Skru låget af og fjern plastringen fra beholderen.

Plastring

② Tag biopsien og læg den i den øverste del af beholderen. Skyl evt. pincetten i saltvand og/eller skrab forsigtigt mod den lille pind.

Biopsi

③

Sikkerhedsforsegling

a) Luk Zero 60 A ved at skru låget på beholderen.
b) Låget skal strammes indtil man hører et click, der bekræfter at beholderen er forseglet korrekt og klar til forsendelse.

Send Zero-beholderen til analyse i henhold til lokale procedurer for forsendelse af diagnostiske prøver.

④ Fremgangsmåde til analyse: Åbn Zero i et stinkskab med udsugning.

Underlæg

a) Skru låget af ved at bryde sikkerhedsforseglingen.
b) Fjern underlægget ved hjælp af en pincet og tag biopsien ud til analyse.