



Beskrivelse af produktet

KWE ansigtsmasker er medicinsk godkendte Type IIR mundbind. Type IIR har en bakterie og virus filtrering på over 98 % og har derved højeste standard mod beskyttelse. Type IIR er i forhold til andre typer, som Type I og Type II, stænkresistent dvs. at mundbindet beskytter imod spytpartikler og lign.

Type IIR er anbefalet af WHO imod Covid 19.

KWE mundbind er CE godkendt.

Anvendelse

- Vask eller sprit hænderne grundigt før og efter brug.
- Tag mundbindet i den øverste kant, hvor næseklemmen kan mærkes.
- Fold lagene ud, så mundbindet er helt udstrakt.
- Placer næseklemmen over næseryggen, med den blå side udad. Dæk mund, næse og kæbe med mundbindet. Fastgør produktet rundt om ørerne med ørestropperne, og form forsigtigt næseklemmen over næsen fra midten og ud.
- Træk det nederste af mundbindet helt ned under hagen, for at sikre et stort beskyttelsesområde.
- Efter hver brug skal der udføres lufttæthedskontrol: Dæk mundbindet med begge hænder og udånd. Hvis du føler, at luft lækker fra næseklemmen, skal du justere næseklemmen igen.

Forholdsregler.

- Du må ikke ændre eller misbruge produktet.
- Dette produkt er et engangsprodukt og må ikke bruges flere gange.

Opbevaring.

Opbevares på et tørt og godt ventileret sted. Undgå høj temperatur, fugtighed og direkte sollys i længere tid. Opbevares væk fra åben ild.

Holdbarhed.

2 år.

Advarsel

Må ikke bruges ikke i nærheden af skadeligt støv, gas eller andet specielt miljø.

Vær opmærksom på, at hvis øre-elastikken er for stram, brydes den let.

Stop brug, hvis der forekommer symptomer som kløe eller ørepine.

Hvis der er nogen skade på mund, næse eller ører, skal dette håndteres, før du anvender mundbindet.