



Kort bruksanvisning MICROLINE SURGICAL clipstång M/L-10

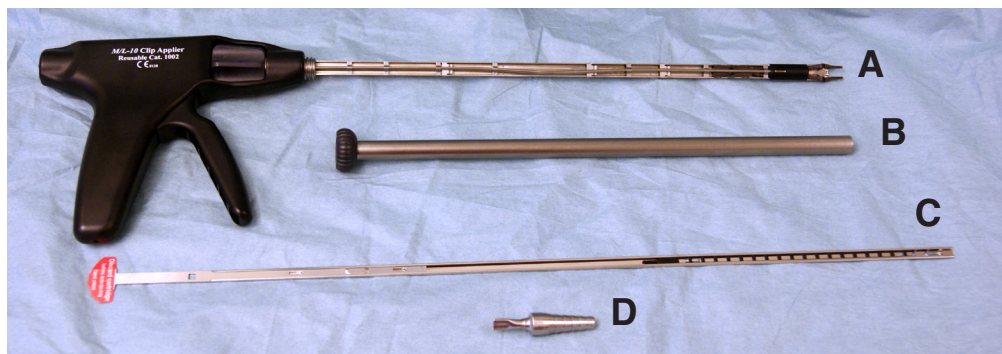




Innehåll:

1. Clipstång M/L10 1002 (A)
2. Ett löstagbart ytterrör av rostfritt stål (B)
3. Ett sterilt clipsmagasin för engångsbruk, tillhörande M/L-10 (C)
4. Rengöringsadapter (D)

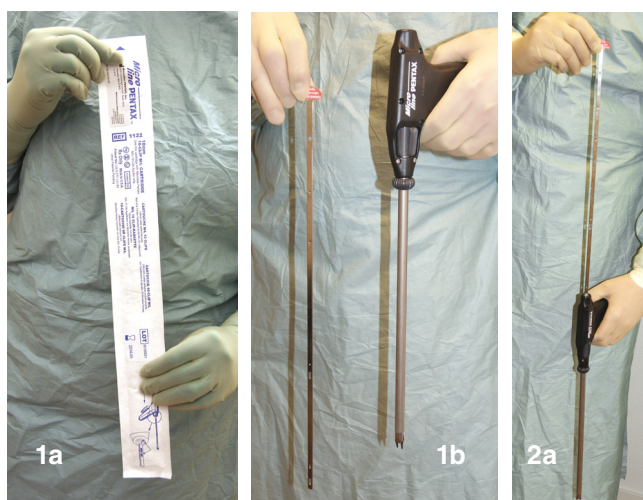

Laddning av M/L-10:

1. Öppna den sterila påsen och ta ut clipsmagasinet (C). Håll i clipsmagasinet på den orange delen och undvik att ta på clipsen..
2. Håll clipstångens käftar (A) riktade neråt. Kläm ihop handtaget/ avtryckaren (A) fullständigt. Rikta in pilen på clipsmagasinet mot handstyckets pil och för ner hela clipsmagasinet (C) i botten på clipstången.
3. Släpp avtryckaren på handtaget. Nu är clipstången laddad automatiskt med ett clips. Observera att de två sista clipsen i clipsmagasinet är blåfärgade.

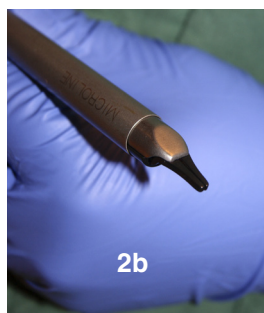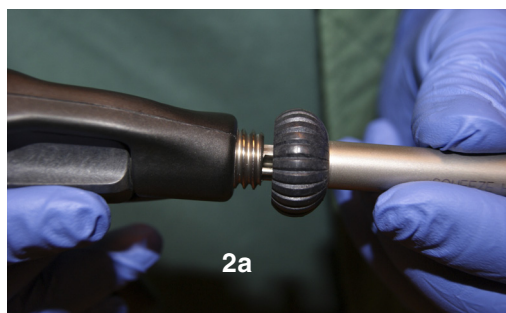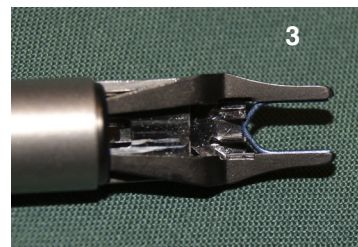





Särtagning av M/L-10:

1. Håll clipstången (A) med käften riktad neråt. Kläm ihop handtaget/ avtryckaren (A) fullständigt. Fäst clipset i ex drapering. HÅLL FORTSATT HANDTAGET IHOPTRYCKT. Dra ur clipsmagasinet (C) ur clipstången, . Släpp avtryckaren med spetsen fortfarande riktad nedåt.
2. Avlägsna ytterröret (B) genom att hålla i röret och skruva det medurs och håll samtidigt emot på den roterande knappen/ vredet. Kläm ihop handstyckets (A) avtryckare fullständig så att käftarna stängs medan röret förs av tången. Släpp avtryckaren.



Rengöring av M/L-10:

1. Fäst en gummislang till diskrengöringsadaptern och för sedan in diskrengöringsadaptern i clipstångens ände. Tillslut gummislangen i avsedd plats i diskmaskinen, för genomspolning av instrumentet. Tången är dock validerad för rengöring utan adapter.
2. Placera clipstången (A) i ett diskgaller där tången kan ligga stilla och inte kommer i kontakt med andra instrument eller käftarna skadas.
3. Sätt ytterröret (B) för genomspolning i diskmaskinen.
4. Maskindiskas med enzymdiskmedel eller liknande diskmedel med neutralt PH-värde.

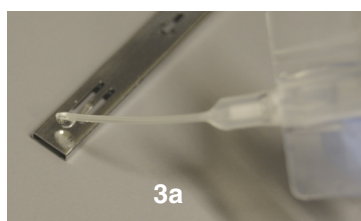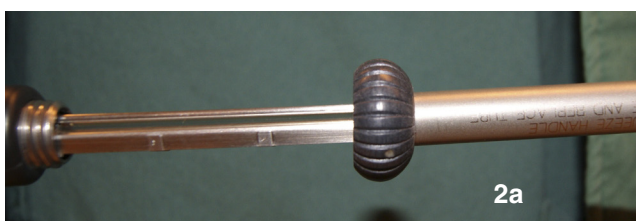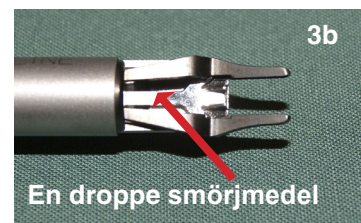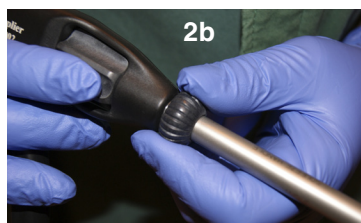

Oljning, hopsättning och sterilisering av M/L-10:

1. Inspektera clipstången (A) och röret (B) från ev. skador och se till att det är torrt och rent.
2. Kläm ihop clipstångens avtryckare (A) och för samtidigt röret (B) över käftarna. Släpp avtryckaren på handtaget. Skruva fast röret genom att vrida det motsols och samtidigt hålla emot på den roterande knappen/vredet.
3. Använd ett tomt (C) clipsmagasin (ta bort den svarta stegen i magasinet) och lägg en droppe smörjmedel (**vattenbaserat**) längst ut på magasinet (oljestickan), på den platta sidan. Rikta in pilen på clipsmagasinet mot handstyckets pil och för ner magasinet i botten på clipstången. Dra ut magasinet ur clipstången igen. Lägg även en droppe olja i käftarna (A) och kläm ihop handstyckets avtryckare, några gånger. Torka av vid behov. Till sist, lägg även en droppe smörjmedel vid knappen/vredet och rotera runt den.
4. Clipstången steriliseras hopsatt men ej åtskruvad. Slå in eller packa M/L-10 på ett sådant sätt att instrumentet skyddas från slag och stötar. Sätt gärna en extra påse över käften på clipstången. Steriliseras upp till 134 grader.

Observera:

1. Var god läs ALLTID bruksanvisningen som medföljer originalförpackningen innan användning.
2. Använd INTE instrumentet om någon av delarna uppvisar tecken på skada vid inspektion.
3. Avlägsna ALLTID clipsmagasinet innan rengöring eller sterilisering av clipstången.
4. Vid laddning och urladdning av clipsmagasinet, håll ALLTID clipstången riktad neråt och avlägsna eventuellt clips från tångens skänklar.
5. Var försiktig så att slag och stötar inte förstör käften på clipstången.

Ordertelefon
Orderfax
E-post order

042-242100
042-242105
order@apgar.se

Vardagar kl 8-16
Dygnet runt
Dygnet runt

Har du frågor om produkterna, kontakta din produktspecialist som du finner på www.apgar.se "Vi på Apgar"

www.apgar.se

apgar
Sverige

Quality for life