

Mediflex

Kirurgiske produkter

Flexarm™Plus Kirurgiske holdere og retraktorer

Brugsanvisning.

Produkter dækket af dette dokument: Se bunden af dokumentet

Advarsel: Leveres usterile. Skal rengøres og steriliseres før brug

Begrænsninger på gentagne rengøringer / steriliseringer: Gentagne behandlinger har minimal effekt på disse produkter. "Livstid" er normalt bestemt af slitage og skade.

Instruktion

Brugssted:

- Når det er muligt, lad så ikke blod, debris eller kropsvæsker tørre ud på produkterne. Bedste resultat fremkommer ved umiddelbar behandling efter brug.

Forberedelse til rengøring:

- Fjern tilbehør, der er monteret på "kvikslip" spidsen
- Fjern Flexarmen fra stangen, som den er monteret på
- Drej fastgørelsesknappen til den fleksible arm **mod uret**, så ledes at den bliver slap og let bevægelig.

Rengøring i maskine:

Mediflexs validerede dekontaminator parametre med Prolystica 2X Koncentreret Alkalisk vaskemiddel er:

Fase	Tid Minutter	Temperatur(°C)
Forvask	2.00	Koldt vand
Vask 1	5.00	51.6
Rens 1	2.00	Varmt Vand
Rens 2	2.00	Varmt vand
Slutrens	1.00	90
Tørring	30-00	90

Rengøring manuelt:

- Forbered et enzymatisk desinfektionsmiddel (som Enzol) efter producentens anbefalinger (7,8ml/l når der ikke er snavs fundet på instrumentet) v. 40° og iblødsæt i 15 minutter
- Skrub de nedsænkede instrumenter med en blød nonmetallisk børste. Bevæg instrumenterne med hånden, mens der skrubbes i et minut på hver del
- Skyl instrumenterne med varmt hanevand i 30 sekunder
- Placer instrumenterne i et bad med varmt vand (38-49°). Bevæg instrumenterne med hånden 1 minut. Gentag yderligere 2 gange.
- Læg instrumenterne i ultralydsbad 15 minutter i 40°C varmt vand og et PH neutralt middel (som Neutraa™). Forbered midlet i henhold til producentens anbefalinger.
- Rens med ren hanevand i et minut
- Gentag denne rengøringsprocedure, hvis instrumentet har nogen form for synlig tilbageværende kontaminering.


Brugen af Flexarm Plus Surgical holdere og retraktorer.



ADVARSEL:

Mediflex Flexarm Plus Kirurgiske holdere og retraktorer må kun bruges af læger, som har tilstrækkelig træning og er familiære med denne type produkter.

Parts of a FlexArm PLUS, shown – 99056-QC

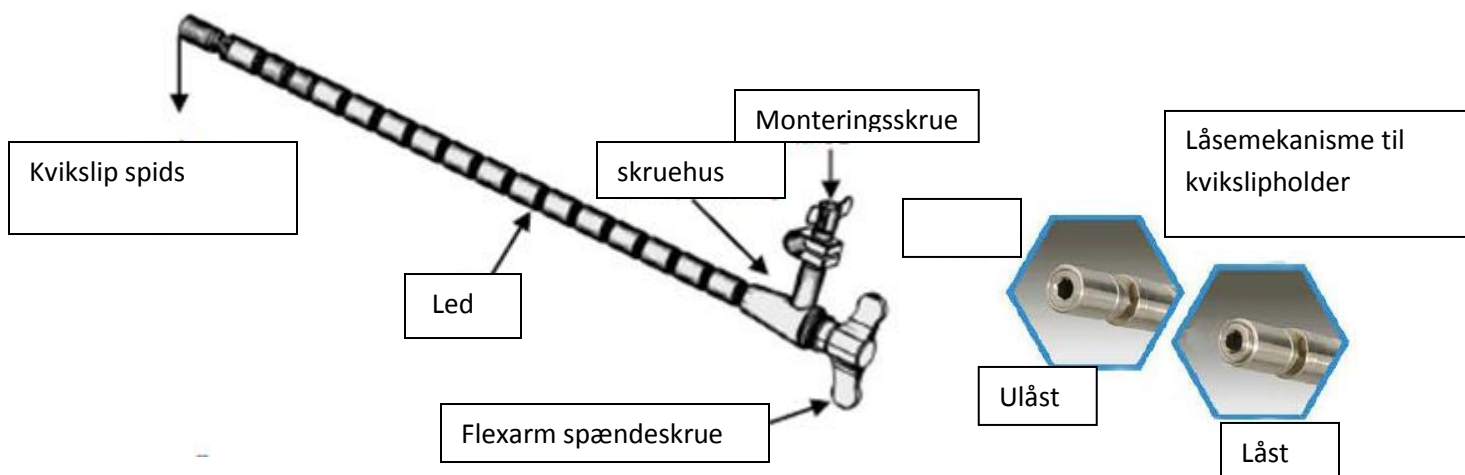

Montering:

Flexarm Plus kan monteres på en Mediflex drejelig tværstang. For at montere, skru monteringskruen mod uret, sæt armen på tværstangen og skru monteringskruen med uret, så armen sidder sikkert fast på tværstangen.

Brug:

Skrue Flexarm spændeskruen med uret for at låse armen i den ønskede position. Hvis der skal repositioneres, så skru spændeskruen mod uret nok til at flytte armen og med uret for at låse, når den er i den ønskede stilling. Armen kan også manipuleres i låst tilstand, når det drejer sig om små justeringer.

Sterilisation og tørring:

- Præ Vac Damp Autoklave: Minimum 4 minutter ved eller over 132°C til 134°C
- 40 minutters tørringstid
- Lufttørring eller brug en blød, ikke slibende og fnuggende serviet (efter vask)
- Valideret hospitalsrengørings og sterilisationsprotokol til genbrugelige instrumenter kan også anvendes.

Vedligeholdelse:

- Vi anbefaler regelmæssig smørring af alle dele med gevind.

Inspektion og funktion:

- *Tjek for sikre at alle bevægelige dele inklusive spændeskruer kan bevæges frit uden at binde*
- *Visuel inspektion efter rifler, revner og andre skader.*

	Produkter dækket af denne vejledning	
<u>FlexArm PLUS Versions</u> 99054-QC, 99054, 99054-D, 99055-QC, 99055, 99055-D, 99055-DS, 99054-QCLR, 99054-LR, 99054-DLR, 99055-QCLR, 99055-LR, 99055-DLR, 99055-DSLR, 99056-QC, 99056, 99056-D, 99056-QC-BS01, 99056-BSS, 99056-BSD .		
<u>Swivel Bar Posts</u> 69053, 69098.		
<u>Attachments / Accessories:</u> 69706, 69707, 72162, 72163.		

Yderligere information:

Mediflex garanterer køber, at Flexarmprodukter er fri for defekter i materiale og udformning i et år fra købsdato.



Danmark A/S

R_X Only

CE



MEDIFLEX Surgical Products
Div. of Flexbar Machine Corporation
250 Gibbs Road
Islandia, NY 11749
USA
1-800-764-0474 (US and Canada toll-free)
+1-631-582-6424 (all other Countries)
+1-631-582-4520 (Facsimile)
email: sales@mediflex.com
Please visit our web site at: www.mediflex.com

Baty International Victoria Road, Burgess Hill West Sussex
RH15 9LR England +44(0)1444 235621



IFU 51 Rev. 1.0

