

Dual Tulip



Brugervejledning

• Indikation

1. DUAL TULIP bruges til at stoppe blødning efter konisation, biopsi eller lign. Produktet placeres med fysisk kompression på blødningen. DUAL TULIP kan også anvendes til forbigående behandling under operation, postoperativt og til kirurgiske sår.

• Klargøring inden brug.

1. Må ikke benyttes, hvis emballagen er blevet beskadiget. Tjek forpakningen for skader.
2. Læger skal være fuldt opmærksomme på de kliniske indikationer og kontraindikationer for dette produkt.
3. Brugeren skal have brugsanvisning, forholdsregler fra lægen, og kun bruge produktet, hvis alt er forstået.
4. Når du anvender DUAL TULIP, skal du åbne pakken og tjekke, at tråden sidder ordentligt fast.

• Brugsanvisning.

1. Efter konisering, biopsi eller lign. skal du lokalisere blødningsstedet og indsætte DUAL TULIP på applikationsstedet.

Sådan indsættes DUAL TULIP

- 1.1. Hæld ca. 50 ~ 80 ml saltopløsning i en beholder eller et glasbæger, og gennemblød derefter DUAL TULIP i et par sekunder.
- 1.2. Indfør spekulum og indsæt DUAL TULIP i vaginas åbning og anbring det tæt på det blødende område (tryk forsigtigt).
- 1.3. Efter at have bekræftet, at DUAL TULIP er korrekt placeret, i det blødende område, skal du sørge for, at tråden er 4-5 cm ud af vaginalåbningen.

2. Sådan fjerner du DUAL TULIP

- Træk langsomt i tråden efter 4-8 timer for at fjerne den indsatte DUAL TULIP i det berørte område.
- * Hvis der er en stor mængde blødning, skal du udskifte produktet for patientens velbehag.
 - * Hvis der er risiko for yderligere blødning, skal du bruge et nyt produkt og følge samme instruktion.
3. Hvis blødningen fortsætter uden for vagina, selv når du bruger DUAL TULIP, skal du kontakte behandlende læge eller nærliggende hospital.
 4. Hvis hele produktet ikke følger med ud, med den fastgjorte tråd, skal du kontakte behandlende læge eller nærliggende hospital.

• Advarsler.

1. Dette produkt er et ikke-absorberbart produkt, og må derfor ikke efterlades i kroppen.
2. Læs instruktionerne omhyggeligt inden brug, og anvend DUAL TULIP i henhold til brugervejledningen.

• Forholdsregler.

1. Da dette produkt er sterilt, må det ikke bruges, hvis emballagen har været åbnet eller er beskadiget.
2. Anvendes kun til engangsbrug. Må ikke resteriliseres eller genbruges.
3. Brug ikke udløbne produkter.
4. Hvis blødningen fortsætter uden for skeden, selv når du anvender DUAL TULIP, skal du kontakte behandlende læge eller nærliggende hospital.
5. Hvis hele produktet ikke følger med ud, med den fastgjorte tråd, skal du kontakte behandlende læge eller nærliggende hospital.

• Opbevaring og bortskaffelse efter brug.

1. Produktet skal opbevares ved stuetemperatur og undgå direkte sollys.
2. Kun til engangsbrug. Må ikke resteriliseres eller genbruges.
3. Dette produkt er ikke-absorberbart, skal det fjernes fra applikationsstedet.
4. Efter brug bortskaffes som almindeligt restaffald.