

Kort brugsanvisning MICROLINE SURGICAL (Pentax) clipsetang M/L-10




Indhold:

1. Clipsetang M/L10 1002 (A)
2. Et aftageligt yderrør af rustfrit stål (B)
3. Et sterilt clipsmagasin til engangsbrug, tilhørende M/L-10 (C)
4. Rengøringsadapter (D)




Ladning af M/L-10:

1. Åbn den sterile pose og tag clipsmagasinet ud (C). Hold fast i clipsmagasinet orange del og undgå at røre ved clipsen.
 2. Hold clipsetangens tænger (A) nedad. Tryk håndtaget/udløseren (A) helt sammen. Ret pilen på clipsmagasinet ind mod håndstykkets pil og før hele clipsmagasinet (C) ned i bunden af clipsetangen.
 3. Slip udløseren på håndtaget. Nu er clipsetangen automatisk ladet med en clips.
- Bemærk, at de sidste to clips i clipsmagasinet er blå.

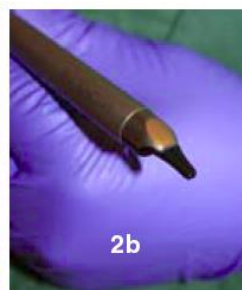



Demontering af M/L-10:

1. Hold clipsetangen (A) med tængerne nedad. Tryk håndtaget/udløseren (A) helt sammen. Træk clipsmagasinet (C) ud af clipsetangen. Slip udløseren, stadig med spidsen nedad. OBS! Sørg for at løsne evt. resterende clips fra clipsetangens tænger (resterende clips kan sidde fast i clipsetangen).
2. Fjern yderrøret (B) ved at holde i røret og dreje det mod uret, mens du holder igen på drejeknappen. Tryk håndstykkets udløser (A) helt sammen, så tængerne lukkes, mens røret føres ud af tangen. Slip udløseren.

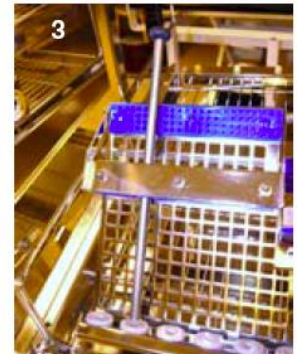

Rengøring af M/L-10:

1. Fastgør en gummislange til rengøringsadapteren og før derefter rengøringsadapteren ind i clipsetangens ende. Slut gummislangen til den tildelte plads i vaskemaskinen, således at instrumentet kan blive rensset igennem.
2. Placer clipsetangen (A) i en vaskekurv, hvor tangen kan ligge stille og ikke kommer i berøring med andre instrumenter eller tængerne beskadiges.
3. Placer yderrøret (B) i vaskemaskinen for gennemrensning.

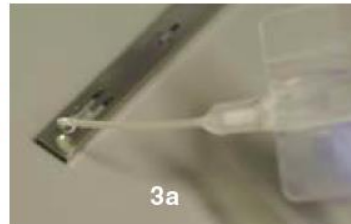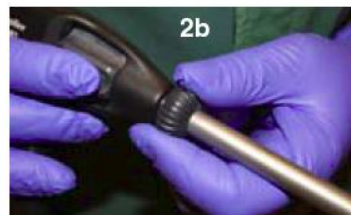

Oliering, samling og sterilisering af M/L-10:

1. Gennemse clipsetangen (A) og røret (B) for evt. skader og sørg for, at de er tørre og rene.
2. Tryk clipsetangens udløser (A) sammen og før samtidig røret (B) over tængerne. Slip udløseren på håndtaget. Skru røret fast ved at vride det med uret og samtidig holde igen på drejeknappen.
3. Anvend et tomt (C) clipsmagasin (fjern den sorte enhed i magasinet) og placer en dråbe olie yderst på magasinet (oliepinden) på den flade side. Ret pilen på clipsmagasinet ind mod håndstykkets pil og før hele magasinet ned i bunden af clipsetangen. Træk magasinet ud af clipsetangen igen. Placer også en dråbe olie på tængerne (A) og tryk håndstykkets udløser sammen nogle gange. Tør af efter behov. Til sidst kan du også placere en dråbe olie ved drejeknappen og dreje den rundt.
4. Clipsetangen steriliseres, når den er skilt ad. Pak M/L-10 ind, således at instrumentet beskyttes mod slag og stød. Læg gerne en ekstra pose rundt om tangens tænger. Steriliseres op til 134 grader.

Bemærk:

1. Læs ALTID Brugsanvisningen, som følger med i originalemballagen, inden ibrugtagning.
2. Anvend IKKE instrumentet, hvis nogle af delene viser tegn på skade ved inspiceringen.
3. Fjern ALTID clipsmagasinet inden rengøring eller sterilisering af clipsetangen.
4. Ved isætning og udtagning af clipsmagasinet skal du ALTID vende clipsetangen nedad og fjerne eventuelle clips fra tangens ben.
5. Vær forsigtig, så slag og stød ikke ødelægger clipsetangens tænger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os på

:
www.apgar.dk

Quality for life