


ASPIJECT®

Passive

CE

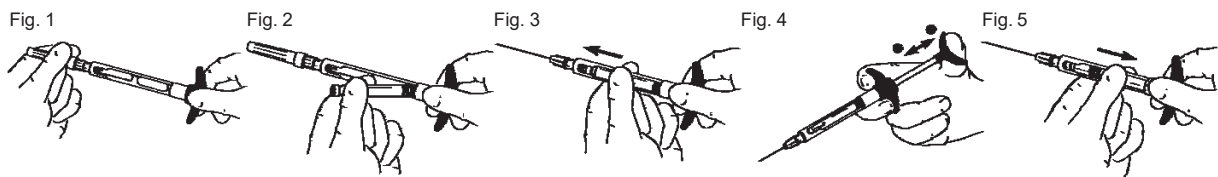

BRUGERVEJLEDNING

da

BESKRIVELSE: ASPIJECT® Passive er en selvspirerende tubulesprøjte til lokal anæstesi.

KOMPATIBILITET: ASPIJECT® Passive anvendes med en standardtubule og en standard dental engangskanyle i henhold til følgende:

REF	Kanylegevind	Tubule
2050, 2051, 2033	M6	1.8 ml
2055, 2056, 2057	7/32"	1.8 ml
2027, 2060, 2061, 2065	7/32"	2.2 ml

! Anvend dentalkanyler med plastikgevind.
Undgå at anvende metalgevind da det kan forårsage aflejring af metalspånere i gevindet.

TILSIGTET BRUG: Til infiltration- og ledningsanæstesi i mundhulen.

BRUGERPROFIL: ASPIJECT® Passive må kun anvendes af uddannede personer med autorisation til at udføre injektioner.

INSTRUKTIONER:

1. Skru først en standard dentalkanyle på sprøjten, fig. 1.
2. Ilæg tubulen med enden af tubulen først, fig. 2.
3. Skub tubulen fremad så kanylen perforerer tubulen, fig. 3.
4. Passiv aspiration: Tryk let på stempelstangen og slip derefter straks trykket. Deformationen af tubulens gummimembran skaber et lille undertryk i tubulen. Bemærk at den selvspirerende funktion afhænger af gummiets elastiske karakter. Af denne grund er ikke alle tubuler velegnede til passiv aspiration, fig. 4.
5. Efter injektionen, skub tubulen bagud, så den slipper kanylen. Fjern tubulen, fig. 5.

RENGØRING:

STERILISERING: Rengør i en dental vaskemaskine/desinfektor på et universalt program.

ASPIJECT® Passive leveres ikke-steril og skal steriliseres inden første brug. Steriliser i autoklave ved 134°C i min. 3 minutter.

OPBEVARING:

Opbevares tørt og beskyttet mod genkontaminering.

BORTSKAFFELSE:

Bortskaf ASPIJECT® Passive, hvis enheden er beskadiget eller har synlige tegn på slid. Efter sidste brug bortskaffes ASPIJECT® Passive i en genbrugsbeholder i ren tilstand.

GARANTI:

ASPIJECT® Passive er omfattet af en 5-års garanti. Skader opstået ved utilstrækkelig pleje eller uheldig håndtering er ikke dækket af garantien.

**PRODUKTETS
LEVETID:**

5 år.