

Brystrem Brugervejledning



Rem A

Trin 1
Før spændet på rem A under skinnen med "1" pegende nedad




Rem A

Trin 2
Før enden af rem A gennem spændet




Rem A

Trin 3
Træk remmen stramt til

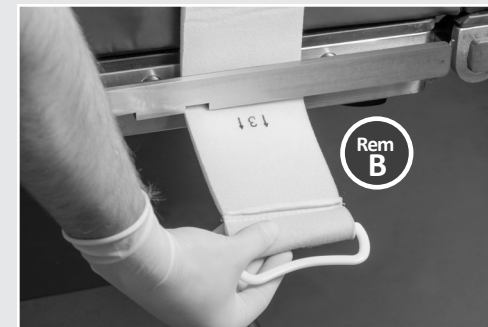

Rem B

Trin 4
På den modsatte side af bordet skal du føre spændet på rem B under skinnen med "3" pegende nedad

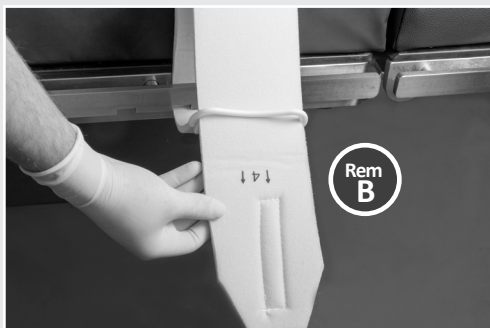

Rem B

Trin 5
Før enden af rem B gennem spændet



Rem B

Trin 6
Træk remmen stramt til



Rem A

Trin 7
Frigør velcro fra rem A



Rem A

Rem B

Trin 8
Fastgør rem A til rem B