

Brugervejledning til WOOP sårretraktor



1. Klargør operationsområdet efter hospitalets anvisninger. Sørg for, at huden er ren og tør.



2. Vælg størrelsen på din Woop i henhold til længden af den planlagte insertion. Se informationsblad for yderligere vejledning.



3. Lav den planlagte insertion.



4. Tryk den blå ring sammen og før den intraabdominalt.



5. Føl området og sikre at der ikke er tarm mellem den blå ring og bugvæggen.



6. Tag fat på hver side af den hvide ring. Træk i Woop'en, indtil den blå ring lukker tæt om bughinden.



7. Rul ringen indad og nedad, indtil den hvide ring lukker tæt mod huden (insertionen udvider sig).



8. Træk forsigtigt i den hvide ring for at sikre dig, at den sidder godt fast.



9. Du kan nu stikke din hånd gennem Woop'en og undersøge bughulen.



10. For at fjerne Woop'en, trækkes den blå ring opad.