

BRUKSANVISNING BMM GOLFF

PRODUCT BESKRIVNING:

G.O.L.F.F. är en steril anti-dimlösning som används för att förhindra imma på endoskopiska/laparoskopiska linser. Det säkerställer klarare syn och undviker onödiga avbrott under operationen. Den kommer också med en självhäftande svamp för säker placering som också är radioopak och latexfri.




ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Anti-dimlösningen är avsedd att användas för att förhindra "imbildning" (orsakad av kondens) på linserna på endoskopiska/laparoskopiska instrument som sannolikt kommer att imma under användning.

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING:

1. Ta bort baksidan från den självhäftande svampen och fäst den på önskad yta.
2. Ta av locket från lösningsflaskan och pressa några droppar på svampen.
3. Rör vid änden av scopet på kameranlinsen eller laparoskopiska linser för att svampa, torka överflödigt lösningsmedel med en steril svamp.
4. Upprepa vid behov.
5. Kassera denna enhet på ett korrekt sätt enligt lokala bestämmelser

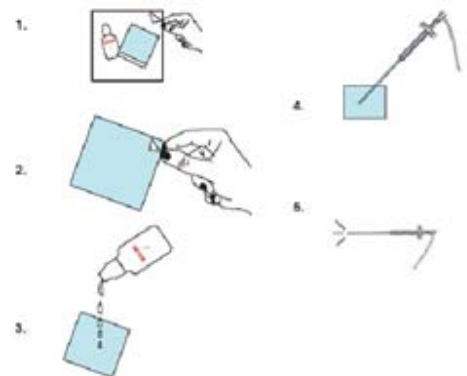

AVFALLSHANTERING:

Hantera och kassera produkten i enlighet med accepterad medicinsk praxis och tillämpliga lokala, statliga och federala lagar och förordningar.

ETIKETT



SYMBOLER



Förvara i torrt område



Lagen begränsar denna enhet till försäljning av eller på order av en licensierad läkare



Steriliserad med bestrålning



Använd inte om den är öppen



CE-märkt



Återanvänd inte



Indikerar att föremålet är en medicinsk anordning



Latexfri



Unik enhetsidentifierare



Håll borta från direkt solljus



Använd senast detta datum



BATRIK MEDICAL MANUFACTURING INC.
850 Halpern Ave. Dorval, QC H9P 1G6 (CANADA)
Tel. +1(514) 631-7988 Fax. +1(514) 631-9083
www.batrik.com



Advena Ltd
Business Centre,
2nd Flr. Tower Street,
Swatar, BKR 4013 Malta