

## Mediflex Kirurgiska produkter

### Flexarm™Plus Optik och instrumenthållare

#### **Bruksanvisning**

Produkter som omfattas av detta dokument: se längst ner i dokumentet.

Obs: Levereras osterilt. Skall rengöras och steriliseras innan användning.

Restriktioner för upprepad rengöring / sterilisering: Upprepad behandling har minimal effekt på dessa produkter. "Livstiden" bestäms oftast av slitage och skador.

#### **Instruktion**

Om möjligt, låt inget blod, skräp eller kroppsvätskor torka på produkterna. De bästa resultaten erhålls genom omedelbar behandling efter användning.

*Förberedelse för rengöring:*

- Ta bort tillbehör, som är monterat med snabbkopplingen
- Ta bort Flexarmen från stången, som den är monterad på
- Vrid vredet på Flexarmen moturs, så att armen blir slapp och kan böjas enkelt

*Rengöring i maskin:*

*Mediflexs validerade dekontaminator parameter med Prolystica 2X Koncentrerat Alkalisk diskmedel är:*

Fas	Tid Minuter	Temperatur( °C )
Fördisk	2.00	Kallt vatten
Disk 1	5.00	51.6
Sköljning 1	2.00	Varmt Vatten
Disk 2	2.00	Varmt vatten
Slutsköljning	1.00	90
Torkning	30-00	90

*Manuell rengöring:*

- *Förbered ett enzymatisk desinfektionsmedel (som Enzol) efter tillverkarens rekommendationer (7,8ml / l när det inte finns någon smuts finns på instrumentet) v. 40° och blötläggning i 15 minuter*
- *Skrubba blötlagda instrument med en mjuk icke metallisk borste. Flytta instrumenten för hand samtidigt som varje del borstas i en minut*
- *Skölj med varmt kranvatten i 30 sekunder*
- *Placera instrumenten i ett bad med varmt vatten (38-49°). Rör runt instrumenten för hand under en minut. Upprepa ytterligare 2 gånger.*
- *Lägg instrumenten i ultraljudsbad under 15 minuter i 40°C varmvatten och ett pH-neutralt medel (som Neutraa™). Förbered medlet enligt tillverkarens rekommendationer*
- *Skölj med rent kranvatten under 1 minut*
- *Upprepa rengöringsproceduren om instrumentet har synlig kvarvarande kontaminering*


**Användning av Flexarm Plus Surgical hållare och retraktorer**



**VARNING:**

Mediflex Flexarm Plus Kirurgiska hållare och retraktorer får endast användas av läkare som har tillräcklig utbildning och är bekant med denna typ av produkter.

**Parts of a FlexArm PLUS, shown – 99056-QC**

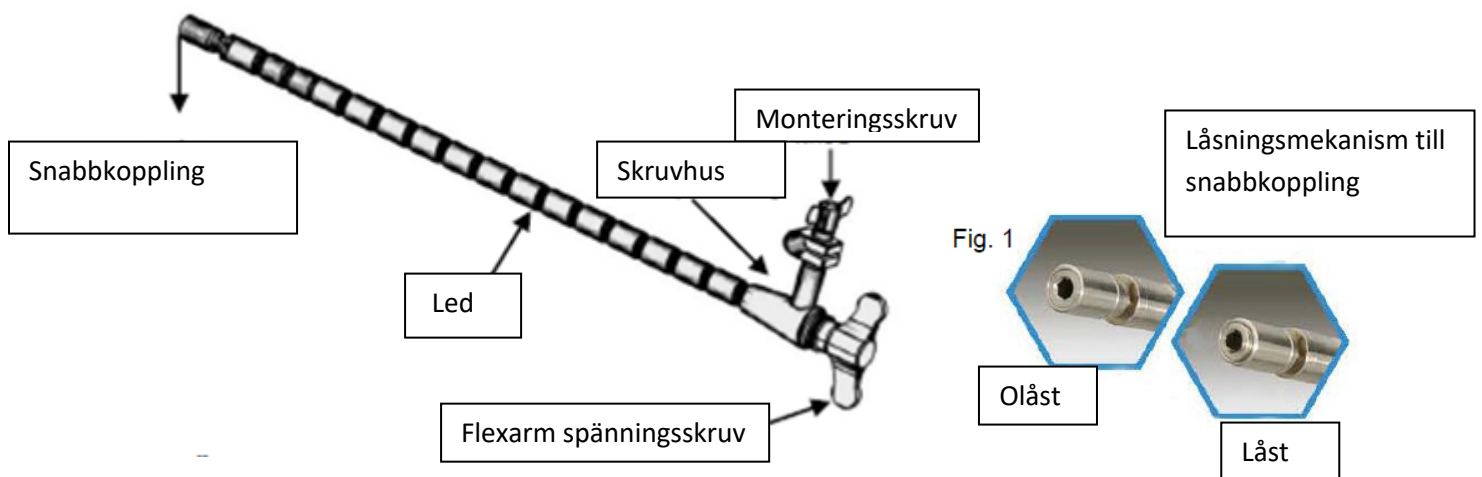

**Montering:**

Flexarm Plus kan monteras på en Medi Flex Swivel stång. För att installera, lossa fästskruven moturs, ställ Flexarmen på stången och dra åt monteringskruven medurs så att armen är ordentligt fastsatt på stången.

**Användning:**

Skruva Flexarmens spänningskruv medurs för att låsa armen i önskad position. Om armen ska ompositioneras, så skruva spänningskruven moturs nog att flytta armen och medurs för att låsa när den är i önskat läge. Armen kan också manipuleras i låst tillstånd, när det handlar om små justeringar.

**Sterilisation och torkning:**

- Pre Vac Damp Autoklav: Minimum 4 minuter vid eller över 132°C till 134°C
- 40 minuters torktid
- Låt lufttorka eller använd en mjuk handduk utan slipmedel (efter tvätt)
- Validerad sjukhus rengöring och sterilisering protokoll för återanvändbara instrument kan också användas.

**Underhåll:**

Vi rekommenderar regelbunden smörjning av alla gängade delar.

*Inspektion och funktion:*

- *Kontrollera att alla rörliga delar inklusive spänningsskruven rör sig fritt utan att kärva*
- *Visuell inspektion för repor, sprickor och andra skador.*

	Produkter som omfattas av denna instruktion:	
<b><u>FlexArm PLUS Versions</u></b> 99054-QC, 99054, 99054-D, 99055-QC, 99055, 99055-D, 99055-DS, 99054-QCLR, 99054-LR, 99054-DLR, 99055-QCLR, 99055-LR, 99055-DLR, 99055-DSLR, 99056-QC, 99056, 99056-D, 99056-QC-BSO1, 99056-BSS, 99056-BSD .		
<b><u>Swivel Bar Posts</u></b> 69053, 69098.		
<b><u>Attachments / Accessories:</u></b> 69706, 69707, 72162, 72163.		

*Ytterligare information:*

*Mediflex garanterar köparen, att Flexarmprodukter är fri från defekter i material och utformning i ett år från inköpsdatum.*

**R<sub>x</sub>** Only

**CE**

# apgar

Sverige

Quality for life



**MEDIFLEX Surgical Products**  
Div. of Flexbar Machine Corporation  
250 Gibbs Road  
Islandia, NY 11749  
USA

1-800-764-0474 (US and Canada toll-free)  
+1-631-582-6424 (all other Countries)  
+1-631-582-4520 (Facsimile)  
email: sales@mediflex.com

Please visit our web site at: [www.mediflex.com](http://www.mediflex.com)

*Baty International* Victoria Road, Burgess Hill West Sussex  
RH15 9LR England +44(0)1444 235621



**IFU 51 Rev. 1.0**

