


## Retractor

### PRODUKTBEKRIVNING

REVEEL är en engångsprodukt med en skaftdiameter som är mindre än typiska 5 mm-kanyler, och är utformad för perkutan införing. När REVEEL aktiveras tillhandahåller den en HJÄRTFORMAD [90 x 70] retraheringsyta som har hög friktion, men ändå är atraumatisk.

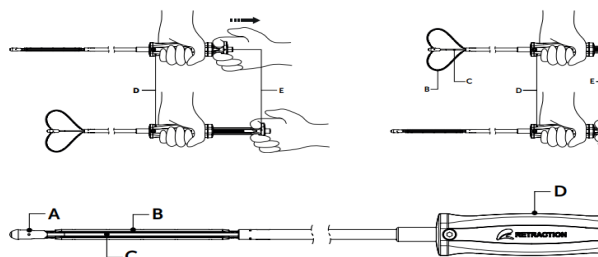

A. Trubbig spets för perkutan införing  
B. Retraheringsarm  
C. I-stag  
D. Handtag  
E. Knapp  
F. Knapp

### ANVÄNDINGSOMRÅDE- /INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

REVEEL är utformad som en leverhake som används vid tithålskirurgi för att flytta och lyfta levern för att få bättre åtkomst, samt synliggöra och stabilisera operationsstället.

### Kontraindikationer

Får ej användas om tithålskirurgi är kontraindicerat.

### VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

1. Läs bruksanvisningen före användning och följ den. Skada på instrumentet kan leda till att patienten skadas. Inspektera alltid instrumentet noga före användning så att det inte är trasigt.
2. REVEEL-hakar är endast avsedda att användas av personer med adekvat utbildning och vana vid minimalinvasiva tekniker. Det finns mer information om tekniker, komplikationer och risker i den medicinska litteraturen.
3. För att undvika att patient och operatör utsätts för risk för brännskada och elchock eller att instrumentet skadas, är det mycket viktigt att ha grundliga kunskaper om laserendoskopi och elektrokirurgiska ingrepp

### BRUKSANVISNING

1. Insufflera peritonealhålan med sedvanlig endoskopisk teknik.
2. När önskat insufflationstryck har uppnåtts ska ett litet hudsnitt göras på lämpligt ställe.  
OBS! Platsen för införingsstället beror på vilket ingrepp som ska utföras, patientens kroppsstorlek och kirurgens personliga preferenser.
3. För in en 5 mm troakar (eller en obturator i samma storlek) i snittet, penetrera hela väggen och dra ut troakaren.
4. Vidga kanalen vid behov med en peang.
5. För försiktigt in REVEEL-haken, under direkt överinseende med hjälp av endoskopet, med en jämn, kontrollerad rörelse.

#### VIKTIGT!

Ta av den röda skyddshättan före användning.

Även om REVEEL-haken är trubbig, så måste du vara försiktig vid införandet för att undvika skador på stora kärl och andra anatomiska strukturer.

Håll organ utom räckhåll för REVEEL-haken under införandet genom att säkerställa att patienten har en lämplig kroppsställning.

Rikta REVEEL-haken bort från stora kärl och andra anatomiska strukturer.

Använd inte onödigt stor kraft under införing, förflyttning och retrahering av vävnad/organ, och avlägsnande av REVEEL-haken.

Försök inte att föra in eller dra ut REVEEL-haken i/ur införingsstället om inte retraheringsarmarna är helt stängda. Underlåtenhet att göra detta kan förhindra införing eller avlägsnande av produkten och/eller leda till skador på retraheringsarmarna och/eller införingsstället.

6. Aktivera REVEEL-haken, under direkt överinseende med hjälp av endoskopet, genom att hålla i handtag D och dra i handtag E tills antingen önskad grad av aktivering har uppnåtts eller ändstoppet har nåtts.

**VIKTIGT!**


Innan retraheringsarmarna stängs, ska du säkerställa att ingen vävnad har fastnat mellan retraheringsarmarna och I-staget.

7. Flytta och retrahera vävnad försiktigt efter behov.
8. Avaktivera REVEEL-haken under direkt överinseende med hjälp av endoskopet, genom att hålla i handtag D och trycka på handtag E samtidigt som du trycker på knapp F.

**VIKTIGT!**

Läs alla anvisningar noga före användning. Lakttag alla varningar och försiktighetsmått som noteras i dessa anvisningar. I annat fall kan det uppstå komplikationer

FÖRVARING OCH HANTERING

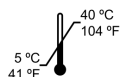

	Artikelnummer
	Batchkod
	Antal
	Steriliserad med strålning
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare
	Utgångsdatum
	Viktigt!
	Får ej återanvändas
	Får ej återsteriliseras
	Använd inte om förpackningen är skadad
	Temperaturgräns
	Latexfri