

## Instruktioner för användning

### Engångsretraktor och krok

VIKTIG INFORMATION - LÄS FÖRE ANVÄNDNING!


#### FÖRSIKTIGHET

Innan du använder produkten, läs följande information noggrant. Detta häfte är utformat för att underlätta användningen av denna produkt. Det är inte en referens till kirurgiska tekniker.

#### Vid Levererans

Surgitools engångsretraktorer och krok levereras steriliserade. Om instrumentets förpackning är skadad, använd inte det. Sterilisera inte om. Återanvändning, uppberedning eller omsterilisering av engångsprodukter kan skapa risk för korskontaminering, patientinfektion och/eller funktionsfel i produkten. Kassera engångskomponenter som infektionsavfall efter användning.

#### Instruktioner för användning

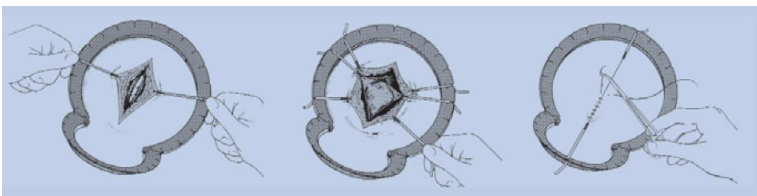

1. Placera ringen runt det första snittet. Sätt in elastiska stagkrokar i vävnad och dra in i direkt motsatta kvadranter. Slitsar på ringen möjliggör enkel placering för korrekt spänning.
2. Flytta eller lägg till krokar under hela proceduren för att bibehålla balanserad indragning.
3. Vid stängning, placera krokar längs snittets axel för att skapa spänning för att underlätta exakt häftklammer eller suturplacering.

Model	Specification	Packaging
ST SG 1601-R	Retractor, 25.3*11.3cm, Sterile Plastic, Single Use	1pc/pk
ST SG 1602-R	Retractor, 22.0*11.3cm, Sterile Plastic, Single Use	1pc/pk
ST SG 1603-R	Retractor, 32.5*18.3cm, Sterile Plastic, Single Use	1pc/pk
ST SG 1604-R	Retractor, 14.1*14.1cm, Sterile Plastic, Single Use	1pc/pk
ST SG 1605-R	Retractor, 18.6*18.3cm, Sterile Plastic, Single Use	1pc/pk
ST SG 1606-R	Retractor, 28.3*14.1cm, Sterile Plastic, Single Use	1pc/pk
ST SG 1607-R	Retractor, 25.0*25.0cm, Sterile Plastic, Single Use	1pc/pk
ST SG 1601-H-1	Sharp Hooks, 3mm, Sterile, Single Use	1pc/pk
ST SG 1601-H-2	Sharp Hooks, 3mm, Sterile, Single Use	2pcs/pk, 20/bx
ST SG 1601-H-6	Sharp Hooks, 3mm, Sterile, Single Use	6pcs/pk, 20/bx
ST SG 1602-H-1	Sharp Hooks, 5mm, Sterile, Single Use	1pc/pk, 20/bx
ST SG 1602-H-2	Sharp Hooks, 5mm, Sterile, Single Use	2pcs/pk, 20/bx
ST SG 1602-H-6	Sharp Hooks, 5mm, Sterile, Single Use	6pcs/pk, 20/bx
ST SG 1603-H-1	Blunt Hooks, 12mm, Sterile, Single Use	1pc/pk, 20/bx
ST SG 1603-H-2	Blunt Hooks, 12mm, Sterile, Single Use	2pcs/pk, 20/bx
ST SG 1603-H-6	Blunt Hooks, 12mm, Sterile, Single Use	6pcs/pk, 20/bx
ST SG 1604-H-1	Two-Bifurcate Hooks, 12mm, Sterile, Single Use	1pc/pk, 20/bx
ST SG 1604-H-2	Two-Bifurcate Hooks, 12mm, Sterile, Single Use	2pcs/pk, 20/bx
ST SG 1604-H-4	Two-Bifurcate Hooks, 12mm, Sterile, Single Use	4pcs/pk, 20/bx

**Obs:** Enheterna är latex- och Nikkelfria. Dessa indikationer gäller för de sterilt förpackade instrumenten.

#### MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Arbetstemperaturområde: 10°C (50°F) up to +40°C (104°F)

Område för relativ luftfuktighet: ≤ RH80%

Atmosfäriskt tryckområde: 760hPa~1060hPa

## INSPEKTION OCH FUNKTIONSKONTROLL

Det är mycket viktigt att noggrant undersöka varje kirurgiskt instrument för brott, sprickor eller funktionsfel före användning. Det är särskilt viktigt att kontrollera områden som blad, punkter, ändar, stopp och snäpp samt alla rörliga delar. Använd inte skadade instrument. Använd inte instrumentet när förpackningen är skadad. Försök aldrig göra reparationer själv.

## FÖRVARING OCH STERILISERING

Instrumenten steriliseras av ETO. Instrumenten måste förvaras rent, torrt, fuktfritt, utan direkt solljus.

Instrumenten ska förvaras individuellt i sin fraktkartong eller på ett skyddande sätt.

## TRANSPORT- OCH LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

Vid transport av enheten bör det undvikas väta och skakningar.

Enheten ska transporteras i en lämplig förpackning. Förvara i rum med:

- Relativ luftfuktighet som inte överstiger RH80%,
- Temperaturområde -10°C (14°F) up to +50°C (122°F),
- Atmosfäriskt tryckområde: 760hPa ~ 1060hPa,
- Utan direkt solljus och ingen frätande gas.

## POLICY FÖR RETURNERANDE AV VAROR

Produkter måste returneras i oöppnade förpackningar med tillverkarens förseglingar intakta för att accepteras för utbyte eller kredit om de inte returneras på grund av ett klagomål om produktfel. Fastställande av en produktdefekt kommer att göras av SEGIMED. Produkter accepteras inte för utbyte om de har varit i kundens besittning i mer än 120 dagar.

## SYMBOLER SOM ANVÄNDS PÅ MÄRKNING



Tillverkare



Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen



Catalog number



Lot number



Se bruksanvisning



Se bruksanvisningen



Engångsbruk



Använd inte om förpackningen är skadad



Steriliserad av ETO



0197 Produkten uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEC för medicintekniska produkter



## Surgitools (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd

Address: Room 426, No.255 Shuangbang Road, Xujing Town, Qingpu District, Shanghai 201702, China

Tel: 0086-574-63565697

<http://www.segimedical.com>



## Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Tel: +49-40-2513175

Fax: +49-40-255726