



Produktinformation

Självöppnande fångstpåse till minimal invasiv kirurgi

OBS: Läs igenom hela bruksanvisningen innan användning

- Steril – enbart om emballaget är oskadd
- Ingen resterilisering
- Enbart enpatients
- Inte lämplig till operationer där laparoskopiska tekniker är kontraindicerad

Användning

ExBag är beräknat till att uppfånga vävnad i samband med laparoskopiska ingrepp.

Produktbeskrivning

ExBag är ett sterilt enpatients instrument. Den består av en fångstpåse, ett införningsrör och en såkallad inskjutare. Den är avsedd att användas med en standard 10 eller 12 mm laparoskopisk port.

Varning och säkerhetsåtgärder

1. Ex-Bag får endast användas av personer, som har en passande utbildning och är tränad i laparoskopisk arbetsmetod.
2. ExBag ligger i ett skyddande hölster och får inte vecklas ut innan den är införd genom porten och ut i operationsområdet. För tidig utveckling skadar påsen och gör instrumentet oanvändbar. Det är inte möjligt att vika ihop påsen igen.
3. ExBag skall skyddas mot kontakt med vassa föremål, som t.ex. skärredskap och findelningsredskap eller liknande.

BRUKSANVISNING

1. Införingsröret innehållande ExBag, förs via porten in i det aktuella operationsområdet.
2. Inskjutaren som är integrerad i skyddshölstret, gör det möjligt att ExBagen pressas ut i operationsområdet.
3. Så snart ExBag är ute ur skyddshölstret, öppnar påsen sig automatiskt.
4. Införingsröret och inskjutaren tas ur porten, som åter kan användas till andra instrument.
5. Preparatet som skall avlägsnas, stoppas ner i påsen.
PS. Om nödvändigt kan preparatet utan fara, findelas i påsen.
6. Med hjälp av en tång, fattas wirens fria ände och dras igenom porten. Detta medför att påsens öppning stängs.
7. Tillsammans med porten och tången dras ExBagen ut ur porthålet.
PS. Om påsens innehåll är för stort, kan det vara nödvändigt att göra hudincisionen och fascia något större och därigenom underlätta påsens extraktion.
8. När ExBagen är uttagen, skall den tömmas och slängas.

