


Bruksanvisning Laparoskopiskt Spol- och SugSet (LISS-4XXX)

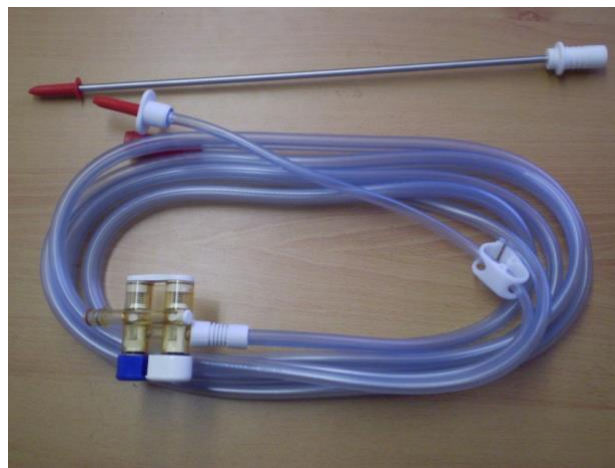

- Denna produkt får endast användas av kvalificerad och fullt utbildad personal.
- För att öppna sterilförpackningen: drag sakta men bestämt isär påsen i markerad ände. Steriltvättad person tar ut innerpåsen ut sterilförpackningen.
- Tag ut spol- och sugsetet ur innerförpackningen och riv itu bandet som håller slangen ihoprullad.
- Stäng den vita slangklämman genom att trycka samman den, ett klick hörs när den stängs.
- Anslut röret till trumpetventilen (handtaget) genom att bestämt trycka rörets vita muff över trumpetventilens anslutning. Ett tydligt hörbart klick hörs när röret anslutits korrekt. Känn efter så röret sitter fast på trumpetventilen.
- Avlägsna och släng rörets röda spetssskydd.
- Avlägsna och släng det röda spetssskyddet från anslutningen till spolpåsen.
- Tryck instickspetsen ordentligt in i botten på påsen med spolvätska. Öppna först därefter slangklämman genom att trycka upp spärren med tummen.
- Anslut den röda gummikonan till sugflaska på sugen. Produkten är nu färdig att användas.

Tryck på den blå trumpetventilen för att spola.

Tryck på den vita trumpetventilen för att suga.

- Efter avslutad operation. Släng hela produkten. Återvinn gärna era rutiner om det är möjligt!

Enpatientsprodukt

Latexfri