

PRIMA<sup>•</sup>pad

TRENDELENBURG  
POSITIONING SYSTEM (TPS)

## QUICK GUIDE PRIMA PAD

- Den vita lyftbiten är placerad i nedre delen av ryggen i starten motsvarande ca. 4 fingrars bredd från utskärningen om operatören ska till botten
- Eftersom det är huden mot PrimaPad som gör att patienten är stabil, så **MÅSTE** rygg och rumpa vara bar
- **KOM IHÅG** Bröstband. Speciellt när patienten måste lutas åt en av sidorna. Sätt remmen på sängen från början



Till patienter med ett BMI på över 30 rekommenderar vi:

- På grund av centrifugalkraften rekommenderas det att luta patienten i omgångar. Börja med 5- 7 grader, vänta några sekunder - låt patienten sjunka på plats, fortsätt tills önskad grad uppnås
- Man kan förvänta sig att patienten rör sig ca. 3-5 cm i sin egen hudsäck. Tänk på att placera patientens tumpa en bit nedanför kanten

