

PRIMA PAD - TRENDELENBURG- LEJRINGSSYSTEM (TPS)

Brugsanvisning

ANVENDELSE

PRIMA PAD Trendelenburg-lejringsystemet anvendes til at forhindre, at patienter glider ned af operationsbordet, når de er lejret i Trendelenburg. Samtidig er PRIMA PAD med til at beskytte mod nerveskade og tryksår.



Trin 1. Forbered operationsbordet

Sørg for, at operationsbordet er plant, og at operationsbordets underlag er fastgjort. Operationsbordets overflade skal være rent og tørt, og ikke er dækket af andre elementer f.eks. mobile bårer og lagner, sengetøj, løftelagner, absorberende måtter osv.

Trin 2. Tag sættet ud af emballagen

Tag PRIMA PAD og alle sættets dele ud af plastemballagen. Smid plastemballagen ud.

Trin 3. Placer PRIMA PAD på operationsbordet

Placer pudens nederste overflade direkte på operationsbordet. Juster puden i forhold til den nederste kant på operationsbordets midtersektion. Hvis operationsbordets midtersektion har en perineal udskæring, skal du sørge for at placere/justere pudens perineale udskæring (hvis din version har en udskæring) over operationsbordets perineale udskæring (se figur 1).

Trin 4. Fastgør PRIMA PAD til operationsbordet


Indfør den nederste fastgørelsesrem (den længste rem) gennem operationsbordet og skinnen. Vend den nederste rem opad og fastgør velcrolukningen (se figur 2). Ekstra remlængde kan rulles sammen, før den sættes sammen med den øverste rem. Disse behøver ikke at være for stramme. Gentag for de øvrige tre remme.

Trin 5. Placer løftelagnet på PRIMA PAD

Fold løftelagnet ud, og læg det over pudens bredde, hvor patientens lænd kommer til at ligge. Centrér løftelagnet, så hver ende er ca. lige langt fra gulvet (se figur 3).



Figur 1:
Justering af puden på
bordet

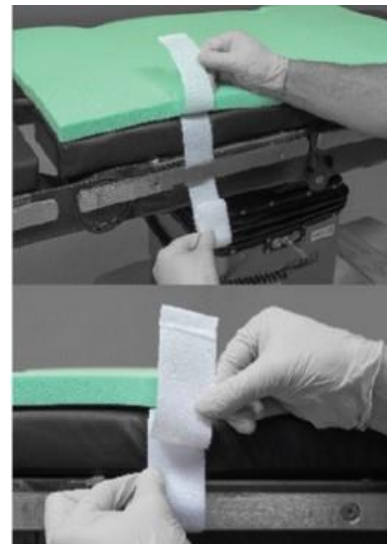


Figur 2:
Fastgørelse af
remme til
skinnen



Figur 3:
Placering af
løftelagen hen
over puden

Trin 6. Placer patienten på PRIMA PAD


Placer patienten på puden i en stilling, hvor armene kan ligge ned langs patientens krop. Sørg for, at skuldrene ikke går ud over pudens kant, og at huden ved skulderbladene og korsbenet er i direkte kontakt med pudens overflade (se figur 4).

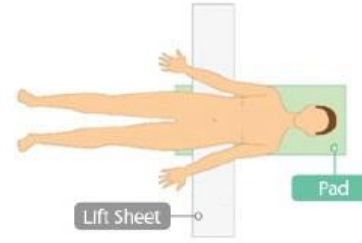

Figur 4:
Patientens
stilling

Trin 7. Fastgør patientens arme med løftelagnet


Svøb løftelagnet omkring patientens arme. Stik løftelagnets ender ind under patienten (se figur 5). Stram det ikke for hårdt om armene. Sørg for at tjekke placeringen af patientens fingre omkring operationsbordets apparater og for ordentlig cirkulation.

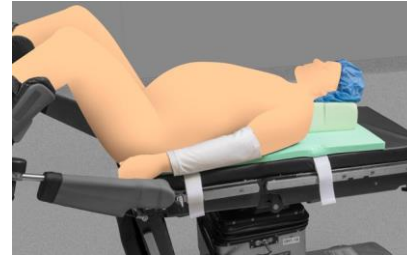

Figur 5:
Fastgørelse af
patientens arme med
løftelagner

Trin 8. Fastgør patienten med remmen omkring kroppen

- Gå over på den modsatte side af operationsbordet. Find remmen med den store rektangel med velcro. Gentag ovenstående trin, hvor du holder remmen med den store rektangel med velcro i retning mod patienten.
- Fastgør de to (2) remme til hinanden, så de sidder godt fast omkring patientens brystkasse (se figur 7). Stram dem ikke for hårdt.

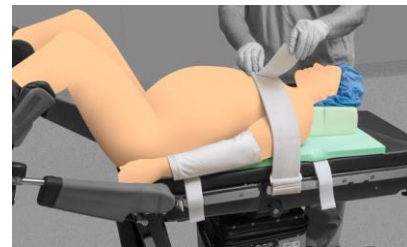

Figur 6:
Fastspænding af rem
til skinnen

Figur 7:
Fastspænding af
remmene hen over
patientens brystkasse

VEDLIGEHOLDELSE

Undersøg puden og remmene. Brug ikke produkter, der er beskadigede eller ødelagte.

HOLDBARHED

Produktet er holdbart i tre (3) år, hvis det opbevares under de angivne forhold.

OPBEVARING OG TRANSPORT

De pakkede produkter skal opbevares på et køligt og tørt sted. De skal opbevares væk fra direkte sollys, ætsende stoffer og i et godt ventileret indendørs lokale.

Puderne skal altid opbevares og håndteres fladt. Opbevar ikke puderne sammenrullede eller -foldede.



GRI Medical &
Electrical Technology
Co., Ltd.
1805 Honggao Road
314031 Jiaxing,
Zhejiang
FOLKEREPUBLIKKEN
KINA
www.gri-alleset.com



EUROPÆISK REPRÆSENTANT
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20
2514 AP, Haag,
HOLLAND
www.emergobyul.com

Distribueret af:
GRI-Alleset Limited B.V.
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
HOLLAND
www.gri-alleset.com

