



For more information
on this product please
scan QR code

Instructions For Use

užití • Gebrauchsanweisung • Instrucciones de uso
d'emploi • Οδηγίες χρήσης • Istruzioni per l'uso
anwijzing • Instruksjoner for bruk • Instrukcja użycia
stručões de uso • Användningsinstruktioner

Disposable Camera Cover

CZ	Jednorázový obal na kameru
DE	Einweg-Kameraabdeckung
ES	cubierta desechable de la cámara
FR	Housse jetable de caméra
GR	Κάλυμμα κάμερας μίας χρήσης
IT	Copertura monouso per telecamera
NL	Wegwerpbare camerahoes
NO	Engangs kameraoppdekking
PL	Ośłona jednorazowej kamery
PT	Cobertura de câmara descartável
SE	Kameraskydd för engångsbruk

Indikationer/Avsedd användning

Kameraskyddet för engångsbruk (DCC8007) indikeras som en steril barriär mellan ett sterilt teleskop och en icke-steril kamera och sladd.

Bruksanvisning

1. Öppna påsen och ta ur produkten genom att använda aseptiska standardförfaranden.
2. Använd kartonginsatsen och skapa en öppning för kameran.
3. För in den icke-sterila kameran i hålrummet med aseptiskt standardförfarande.
4. Fatta fast tag i den halvt övertäckta kameran och dra plasthylsan över kamerasladden och fortsätta dra ut övertäckningen tills antingen:
 - Sladden är täckt bortom det sterila fältet, eller
 - Plasthylsan är helt utdragen (rekommenderas).

Ytterligare användningsinstruktioner - Endast DCC8007

1. Med övertäckningsreglaget i läge "I", tryck ned adapterklämman och anslut till teleskophuvudet.
2. Frigör adapterklämman och försätt reglaget i "L"-position för att låsa på plats.
3. Om så krävs kan enheten låsas upp och omplaceras.
4. I slutet av operationen, lösgör låset och pressa samman adapterklämmorna för att koppla bort adaptern från kamerahuvudet och ta bort den från hylsan.

Försiktighetsåtgärder

Använd inte om paketet har skadats, blivit perforerat eller öppnats.

Denna apparat får endast användas av lämpligt utbildad vårdpersonal.

Använd inte för något annat syfte.

Endast engångsanvändning, återanvänd inte, återbehandla eller återsterilisera eftersom detta kan äventyra enhetens prestanda eller skapa en risk för kontaminering.

Se till att enheten inte är perforerad eller sönderriven före användning.

Denna enhet är steril (ETO). OBS! Denna bruksanvisning avser sterila enheter som sålts av Fairmont Medical. Om enheten har kod "XXXX NS," hänvisas till tredjepartstillverkare för sterilitetsspecifikationer.

Denna enhet måste kasseras i enlighet med lokala miljölagar och föreskrifter.

Material

DCC-serien är främst tillverkad av polyetylen, ABS och polymetylmetakrylatpolymer.

Alla komponenter och packningsmaterial är fria från latex.



Single sterile barrier system
with protective packaging inside



Is a medical device



Do not resterilise



Made in Australia



Latex free



Keep away from sunlight



Keep dry



Notified Body



Do not use if packaging is
damaged



UK Conformity Assessed



Conformité Européenne



Non-sterile



Fairmont Medical Products Ltd
Elizabeth House
28 Baddow Road
Chelmsford
Ph +44 (0) 1245 206800
www.fairmontmedical.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem The
Netherlands



Fairmont Medical Products Pty Ltd
90 Prosperity Way
Dandenong South
Victoria 3175
Australia
Ph +61 3 9720 8840
www.fairmontmedical.com.au

PM029 Version 4.4
Issued by L. Wood 07/02/2025

Fairmont Medical Products Pty Ltd is certified to ISO 13485: 2016

Product specifications subject to change without notice. Pictures shown may vary from actual product.

© 2024 Fairmont Medical Products Pty Ltd all rights reserved.

*Please note the CE 2460 mark applies to sterile versions of the product and the CE mark applies to non-sterile versions.